

<b>IT Inspektion: Workstations</b>			
Tätigkeit	Durchgeführt		Anmerkung
	Ja	Nein	
<b>Hardware Check</b>			
Überprüfung der Arbeitsplatzinstallation			
Überprüfung der Anschlüsse und Verkabelungen			
Überprüfung der Systemleistung			
Überprüfung der Festplattenkapazität			
Reinigung der Workstation			
Reinigung der Monitordisplays mit geeignetem Reinigungsmittel			
Überprüfung der täglichen Sichtprüfung			
Überprüfung der Monitorkonstanzprüfung			
Überprüfung Brennroboter inkl. Steuerrechner (Fehlermeldungen, Füllstände, Brennaufträge)			Falls vorhanden
Medienanpassung für die Weitergabe an Patienten			Falls vorhanden
<b>Software-Check</b>			
Überprüfung JiveX Softwareupdates / Clientverteilung			
Überprüfung des Betriebssystems			
Überprüfung Windows Updates			
Clean-Up nicht mehr notwendiger Dateien und Backups			

**Folgende Workstations wurden gecheckt:**

---



---



---

<b>IT Inspektion: Server</b>			
<b>Tätigkeit</b>	<b>Durchgeführt</b>		<b>Anmerkung</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nein</b>	
<b>Hardware Check</b>			
Analyse Fehlermeldung / Auswertung Server Event Logs			
Festplatten-Check / RAID-Prüfung / Kapazitätsprüfung			
Überprüfung Garantiestatus			
Check der Serverauslastung			
Temperaturcheck			
Überprüfung der Lüfter			
Aussaugen der Server inkl. Lüfter (falls notwendig)			
<b>Software-Check</b>			
Überprüfung des Betriebssystems			
Überprüfung Treiber- und Firmwareupdates (ggf. Durchführung)			
Überprüfung Windows Updates (ggf. Durchführung)			
Clean-Up nicht mehr notwendiger Dateien und Backups			
Check der PACS Installation und Konfiguration (JiveX)			Falls vorhanden
Prüfung und Bereinigung der PACS Benutzerprofile			
Prüfung und Bereinigung der PACS Aufträge (Sendejobs etc.)			
Einspielen optionaler JiveX Patches			
Überprüfung der Clientverteilung			
Überprüfung der Backups und der Archivierung (Datenbank und Bilddaten)			

**Folgende Server wurden gecheckt:**

---



---

<b>IT Inspektion: Sicherheit</b>			
Tätigkeit	Vorhanden		Anmerkung
	Ja	Nein	
<b>Security Check</b>			
Virens Scanner (Hersteller / Version)			
Firewall (Hersteller Version)			
Verantwortliche Person für Netzwerksicherheit			
Tätigkeit	Durchgeführt		Anmerkung
	Ja	Nein	
<b>Security Check</b>			
Prüfung des Zuweiserportals			Falls vorhanden
Prüfung der Hardwareschnittstellen			
<b>Wünsche und Fragen des Kunden</b>			

**Anmerkungen zur gesamten Inspektion**

---



---



---



---

Inspektion durchgeführt am:

Zuständiger Techniker (Unterschrift)